

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/maska-ochronna-filtrujaca-kn95-ffp2-zestaw-5-sztuk-p-18084.html>



Maska ochronna filtrująca KN95 FFP2 zestaw 5 sztuk

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MASKA5
Kod EAN	6973115039995

Opis produktu

Maska ochronna filtrująca KN95 FFP2 zestaw 5 sztuk

Maski filtrujące są kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych. Maski ochronne 4-warstwowe typu FFP2 KN95 zapewniają najlepszą ochronę naszego organizmu przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w powietrzu, np. dymy, mgły, aerozole oraz bakterie i wirusy.

Maska jest wykonana z najlepszej jakości włókniny zapewniającej zdecydowanie lepszy rodzaj filtrowania od standardowych dostępnych na rynku. Półmaska przeznaczona jest do jednorazowego użytku, czas jej używalności wynosi około 8h. Maseczka na wysokości nosa posiada metalową blaszkę umożliwiającą jak najdokładniejsze dopasowanie do twarzy.

Maska polecana przez WHO z powodzeniem używana w szpitalach.

Sprzedawana przez nas półmaska została wykonana zgodnie z europejskimi normami, potwierdzonymi certyfikatem dopuszczenia CE: EN149:2001+A1:2009 zgodnie z dyrektywą R2016/425 (sprzęt do ochrony osobistej - certyfikat CE wydany w EU) oraz w klasie bezpieczeństwa FFP2. Skuteczność filtracji takiej maski to nawet 95%. Jest to filtracja bardzo dobrej jakości w porównaniu do niskiego oporu oddychania. Półmaski filtrujące należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 90% i w temperaturze od -20°C do +40°C. Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.

Jak prawidłowo założyć maseczkę ochronną

Przed założeniem i zdjęciem maski należy dokładnie zdezynfekować ręce.

- Chwyć prawidłowo maskę, rys. 1
- Przyciśnij maskę do twarzy i załóż gumki dookoła obu uszu, rys. 2
- Rozginając metalowy łącznik, rys. 3
- Wymodeluj maseczkę, za pomocą metalowego łącznika, aby idealnie przylegała do twarzy, rys. 4 i 5